


# Návod na diagnostické svítilny: KaWe Cliplight LED a KaWe bílá

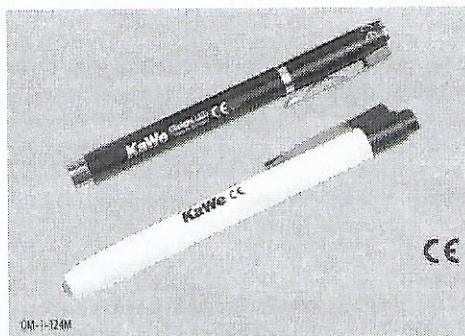

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral KaWe výrobek. Naše výrobky jsou známé pro svou vysokou kvalitu a životnost. Tento výrobek splňuje standardy 93/42/EEC (pro zdravotnické výrobky).



Prosím, přečtěte si návod pozorně a pečlivě před použitím výrobku a dodržujte dané instrukce. Seznamte se důkladně s jeho pracovním využitím před prvním použitím. Ponechte si návod na budoucí použití a přenesení na dalšího uživatele tohoto zařízení.

## Využití:

Diagnostické lampy jsou pouze pro autorizované osoby.

## Účel:

Svítilny se používají během diagnostických procedur k osvětlení různých částí lidského těla, které mají být vyšetřeny (např. v ústech nebo povrch pokožky).

Diagnostické svítilny Cliplight LED jsou schváleny pro oční vyšetření (Fotobiologicky bezpečnostně testováno v souladu s normou DIN EN 62471:2009-03 pro svítilny a světelné systémy).

## Použití:

**Svítilna KaWe Cliplight LED:** Svítilnu rozsvítíte stisknutím postranního klipu ke kovovému proužku na těle svítilny. Baterie vyměníte vyšroubováním kovové koncovky v přední části svítilny (u žárovky).

**Svítilna KaWe bílá:** Svítilnu zapnete a vypnete stlačením černého tlačítka v horní části svítilny (jako u propisovací tužky). Chcete-li vyměnit žárovku či baterie, vyšroubujte černou (horní) část klipu.

## Nevhodné použití:

Jakékoliv jiné, než zde specifikované a popsané použití, není v souladu se zamýšleným způsobem použití. Výrobce není zodpovědný za vzniklé škody.

Diagnostická svítilna KaWe bílá není určena pro vyšetření očí!



### Varování:

Nikdy nedovolte, aby se svítilny dostaly do kontaktu s kapalinami. Zabraňte přímému kontaktu s jazykem či sliznicemi. Při vyšetření ústní dutiny se ujistěte, že svítilna nemůže spadnout do pusy, hrozí riziko udušení. Jestliže svítilna vykazuje viditelné známky poškození, nesmí se dále používat pro klinické účely. Diagnostická svítilna KaWe bílá není určena pro vyšetření očí!

### Záruka:

Pokud používáte svítilny správným způsobem a v souladu s tímto návodem, garantujeme dvouletou záruku ode dne prodeje. (Záruka se nevztahuje na žárovky, baterie nebo nabíjecí baterie). Pokud chcete další informace nebo je nutné svítilnu opravit, kontaktujte svého prodejce.

### Limity opětovného použití:

Žádné zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Doporučuje se, aby byly svítilny po každém použití řádně čištěny.

### Skladování a doprava:

Svítilny skladujte v obale, abyste je chránili před nečistotami a prachem.  
Upozornění: Při pádu může dojít k prasknutí žárovky či rozbití celé svítilny.

### Čištění, desinfekce, sterilizace:

Povrch svítilny můžete otřít vlhkým nebo suchým měkkým hadříkem. Povrch svítilny a přední část (žárovku) můžete očistit hadříkem navlhčeným v alkoholu. Používejte pouze běžné neagresivní desinfekční prostředky (např. Desinfekce Orochemie B40). Svítilnu nesterilizujte!

### Kontrola, test funkčnosti a dodatečné informace:

Vizuálně zkontrolujte svítilnu před použitím.  
Tento výrobek je nutné likvidovat ve sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení.

### Běžné příslušenství:

Bližší informace o těchto částech najdete na [www.kawemed.de](http://www.kawemed.de)

<b>Výrobce vč. kontaktu</b> KIRCHNER & WILHELM GmbH & Co. KG Eberhardstraße 56, DE-71679 Asperg Tel.: +49 (0) 7141 68188-0 <a href="mailto:info@kawemed.de">info@kawemed.de</a> , <a href="http://www.kawemed.de">www.kawemed.de</a>	<b>Distribuce v ČR</b> ZSZ s.r.o. Na Volánové 19, 160 00 Praha 6 Tel: 222 720 006 <a href="mailto:info@zsz.cz">info@zsz.cz</a> , <a href="http://www.zsz.cz">www.zsz.cz</a>
--	---

### Symbody

	Výrobce
	Datum výroby
	Dbejte návodu
	Separátní likvidace elektrických a elektronických zařízení.

	LOT kód
	Označení shody s EU nařízením
	Varování
	Likvidace baterií ve specializovaném sběrném středisku.

Všechny informace o výrobcích, jejich vzhled a údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.