

Etac My-Loo 2/6/10 cm

etac®


Návod k použití

78682G 22-01-26


CE

A


8030 1510

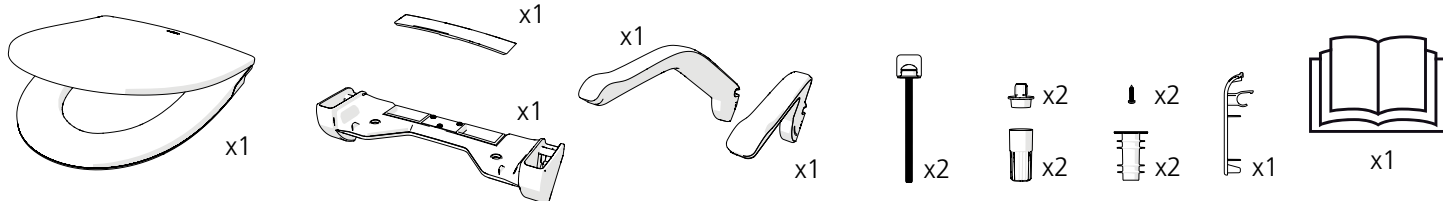

8030 1511

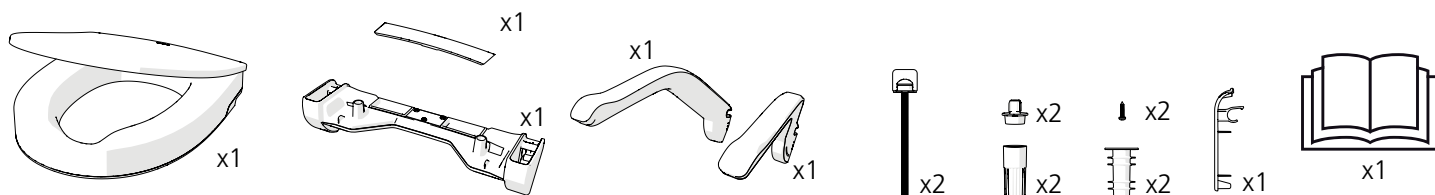

8030 1512

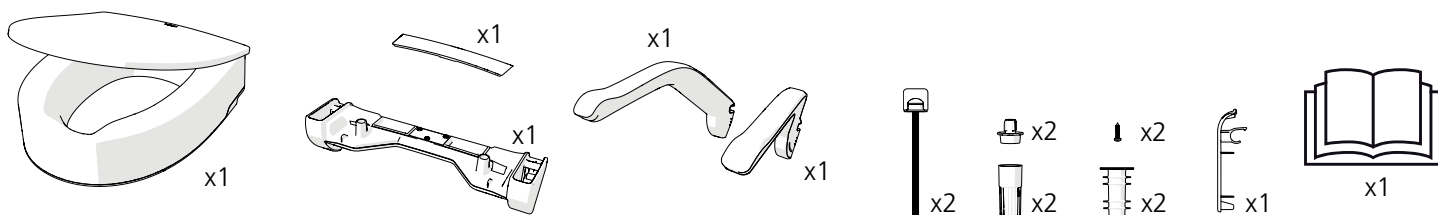





8030 1513














8030 1514




B

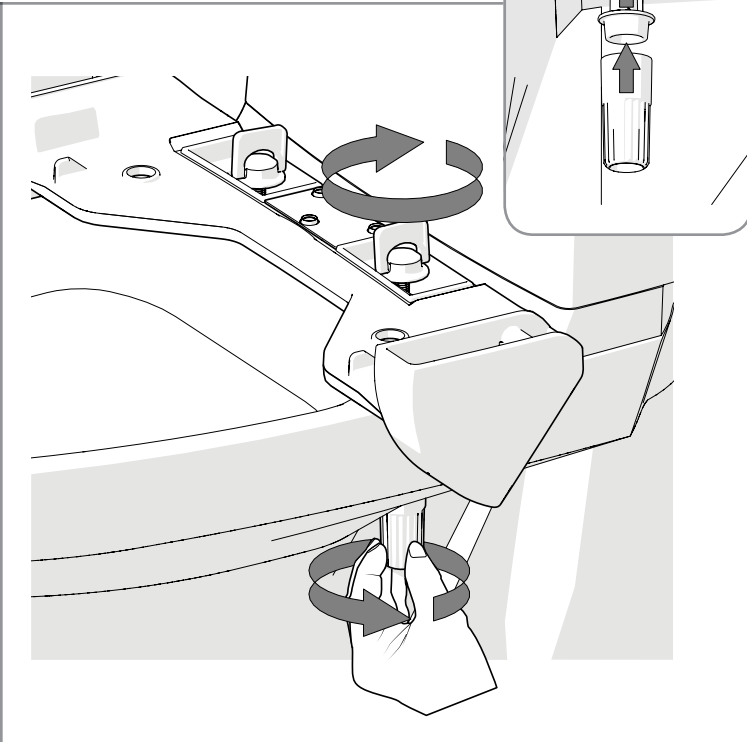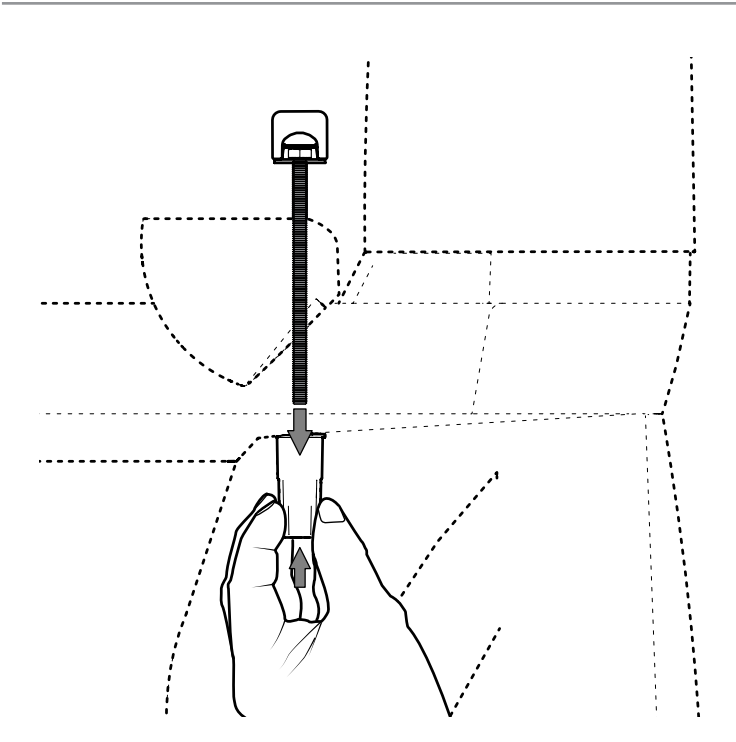
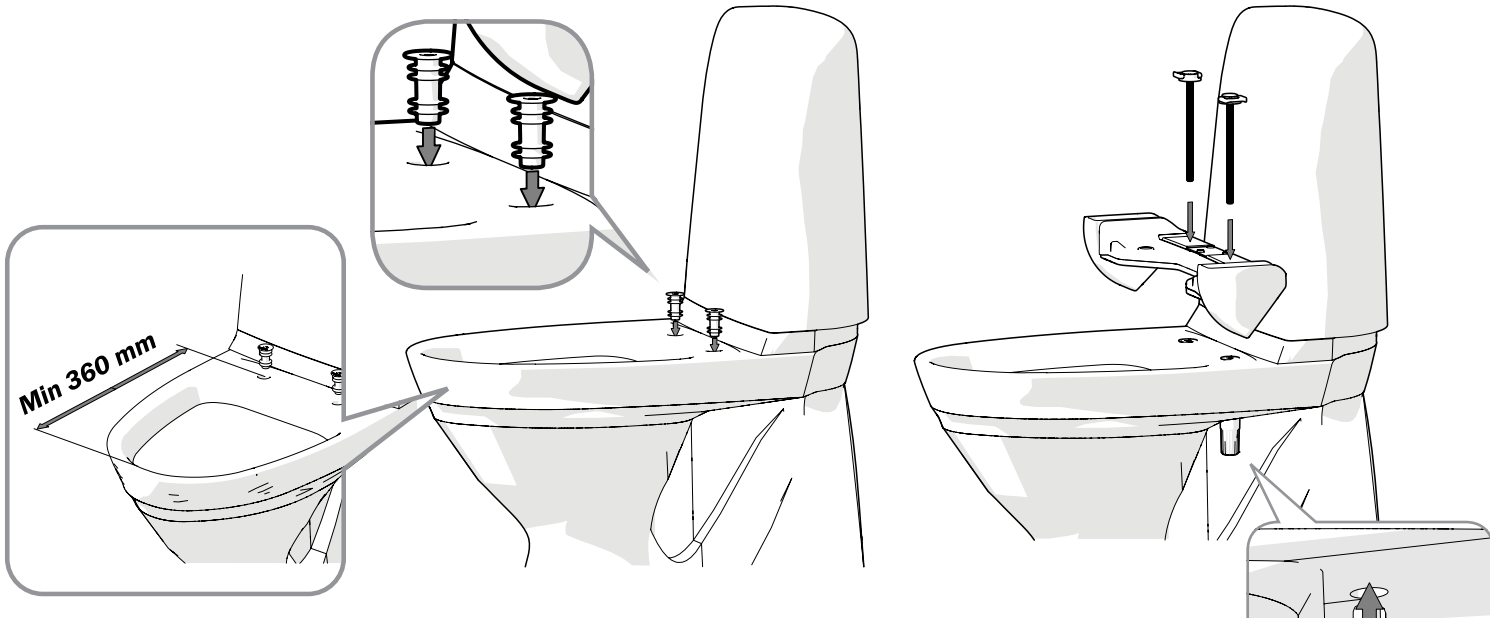
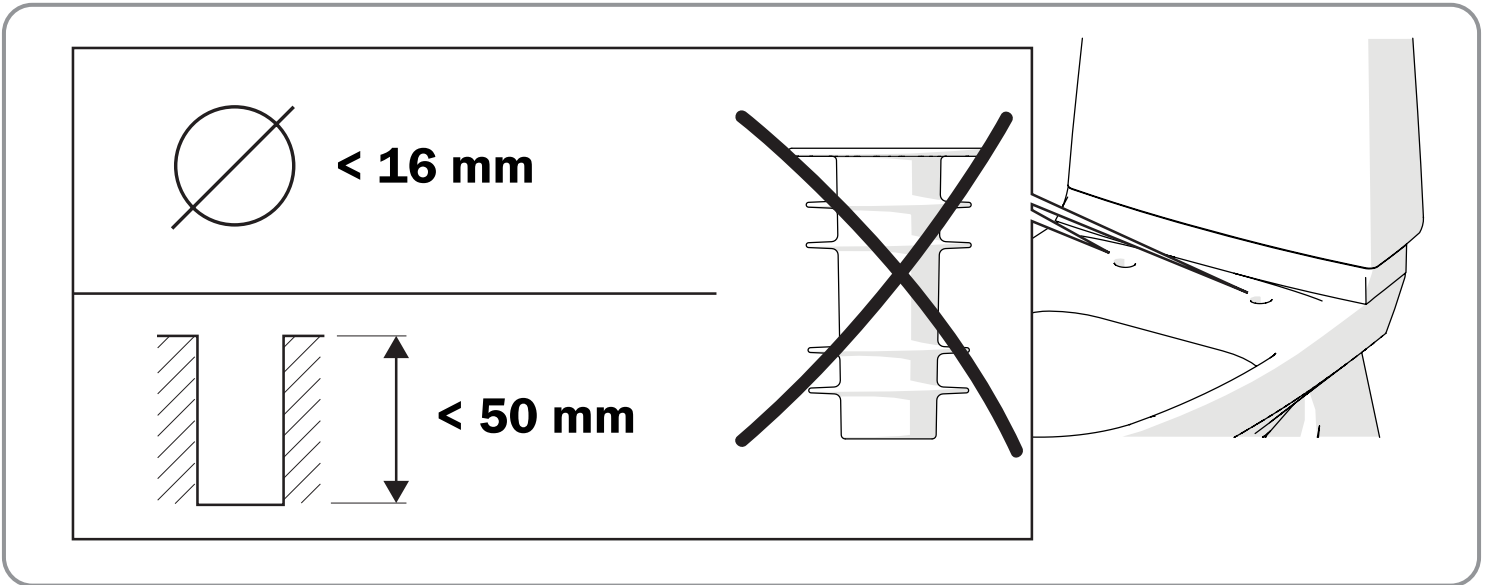


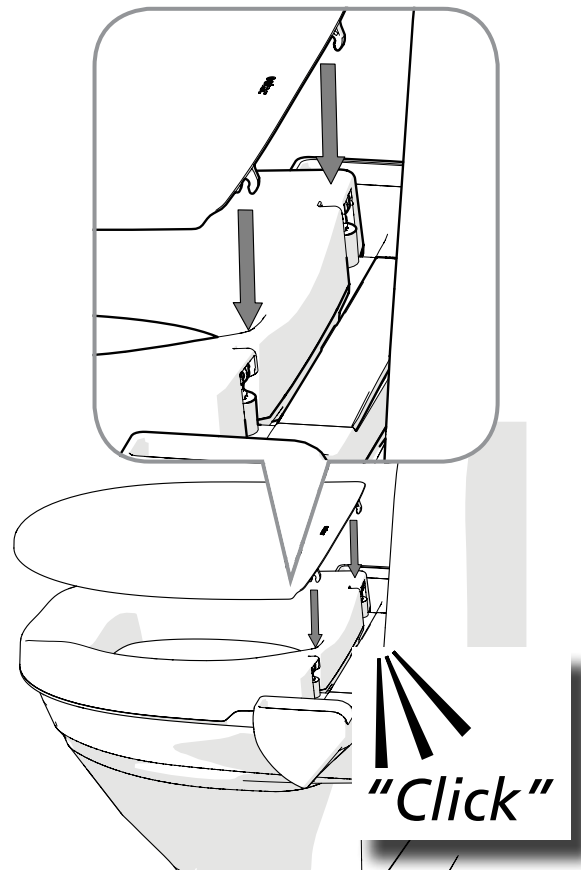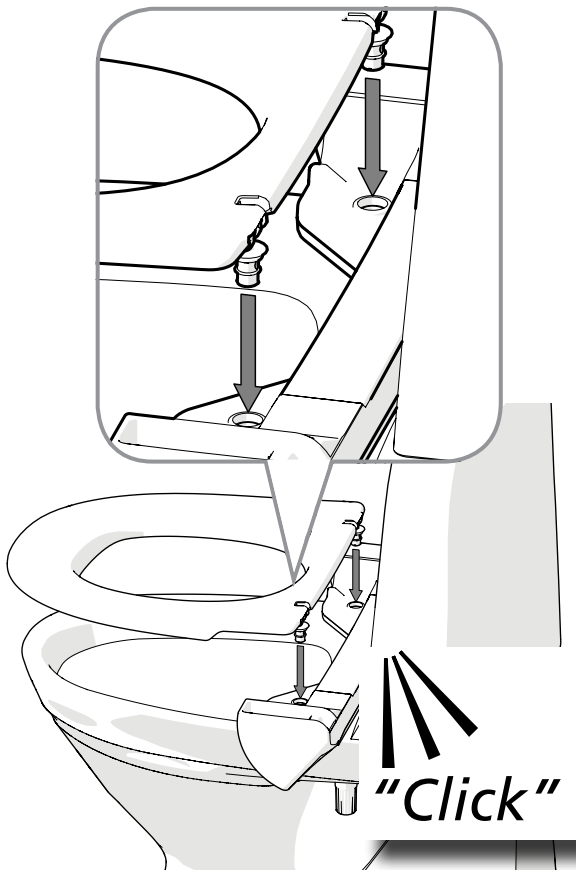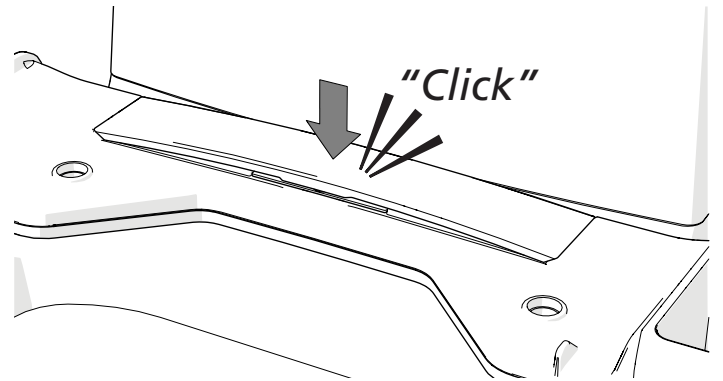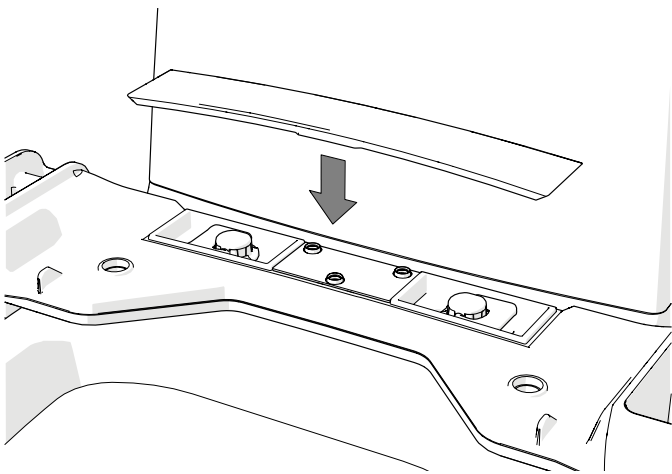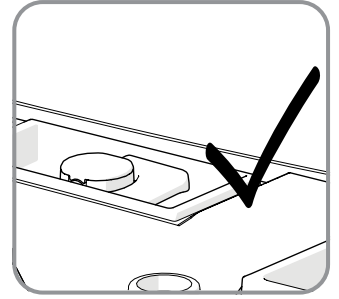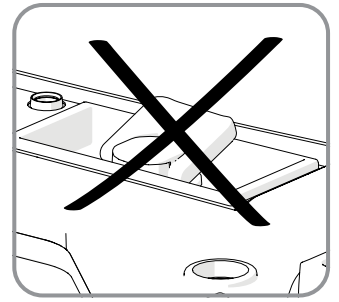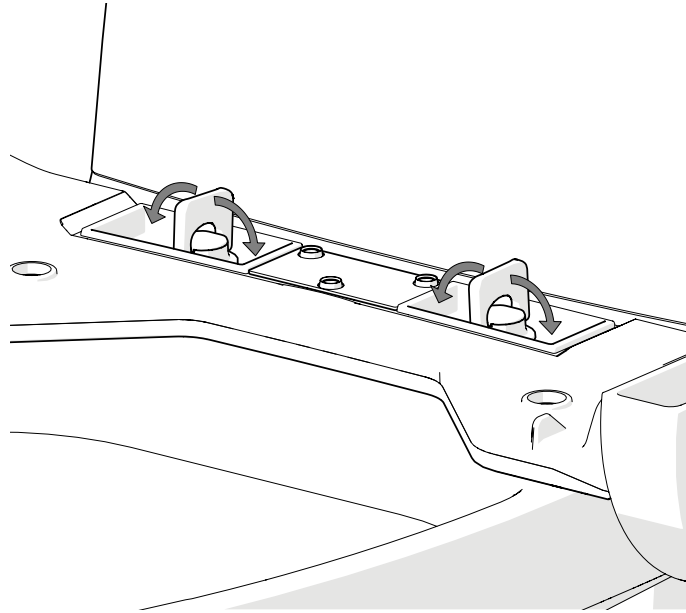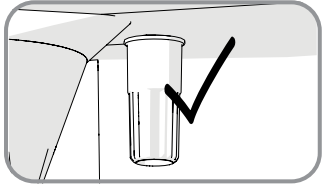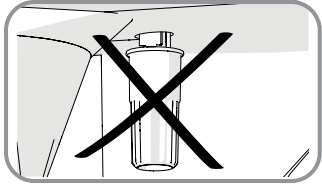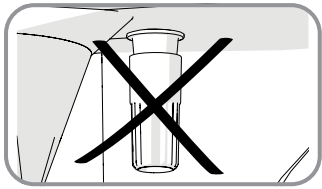

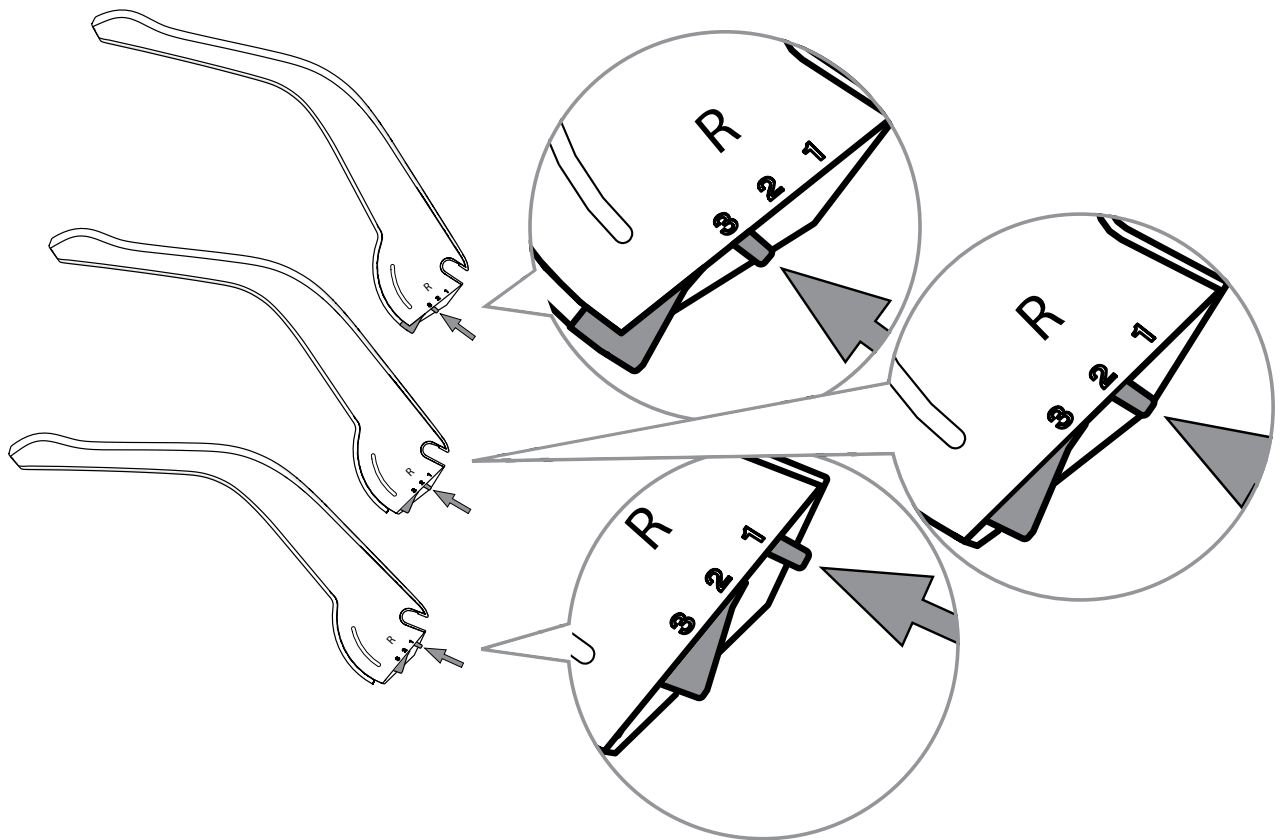


		1	2	3
	80301510	214 mm	254 mm	294 mm
	80301511	177 mm	217 mm	257 mm
	80301512	137 mm	177 mm	217 mm

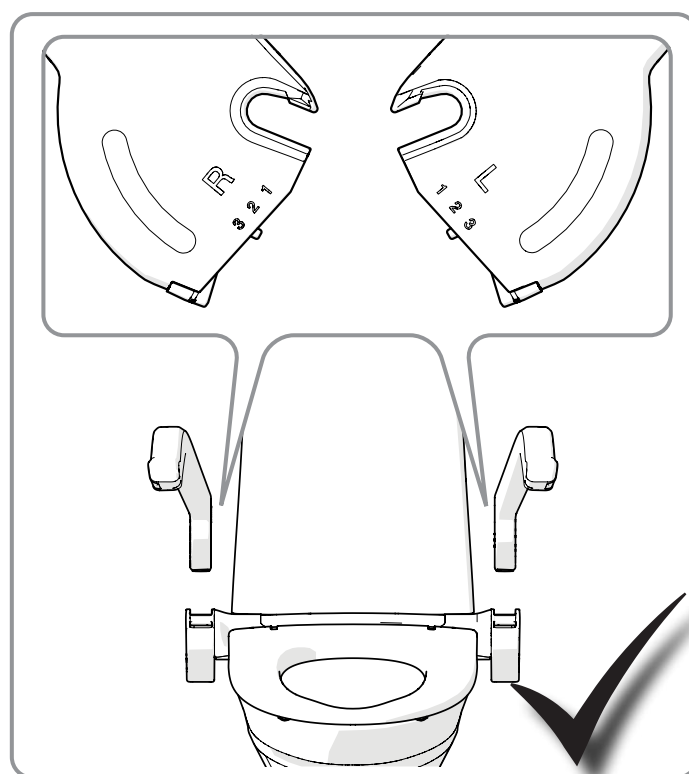


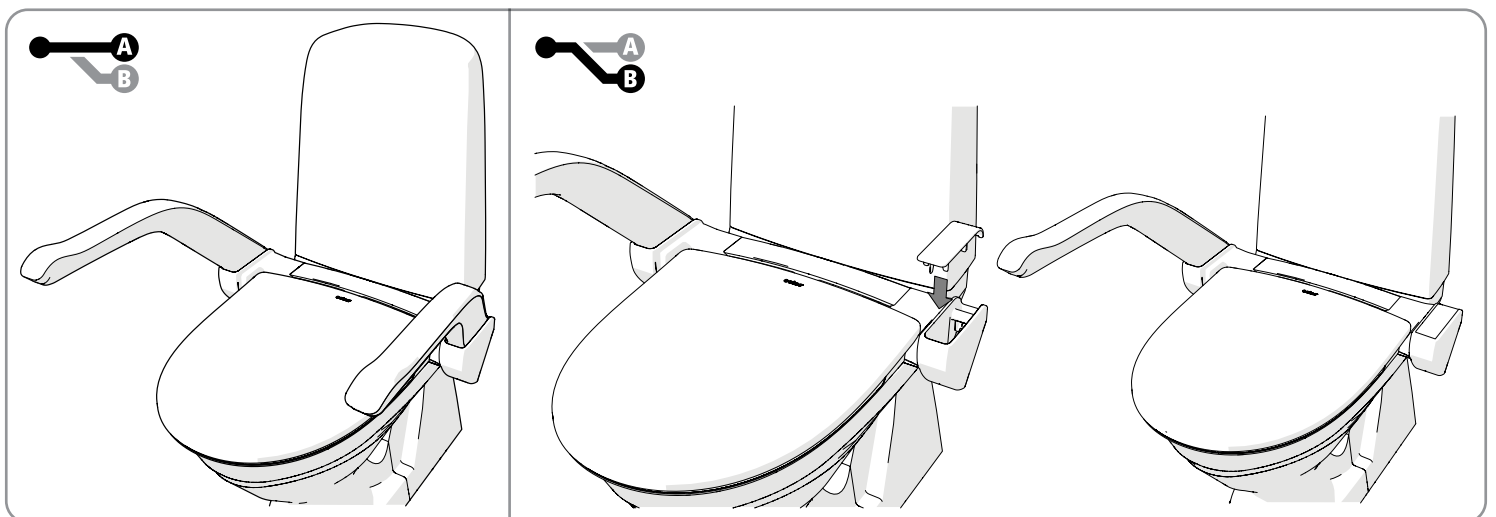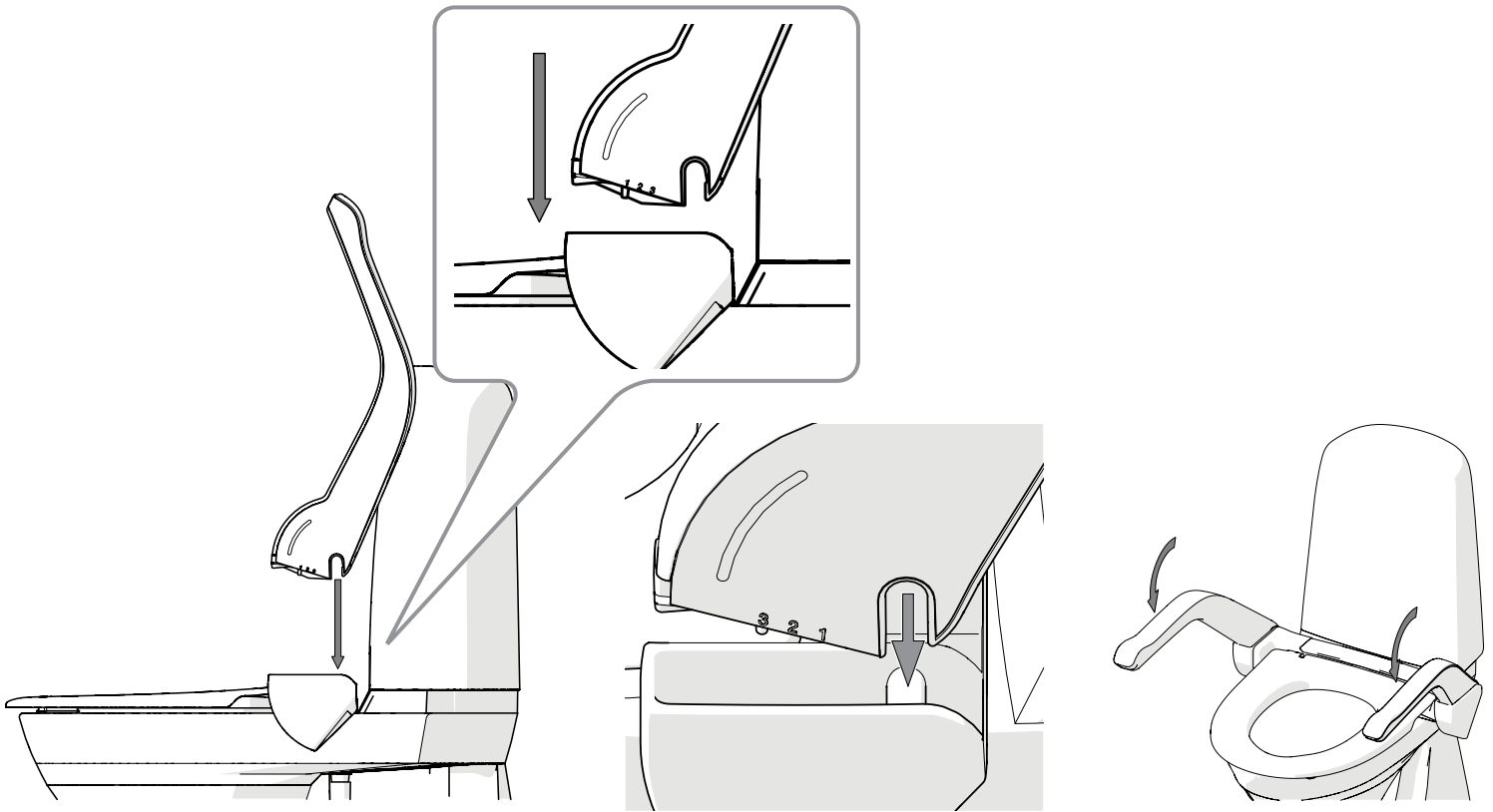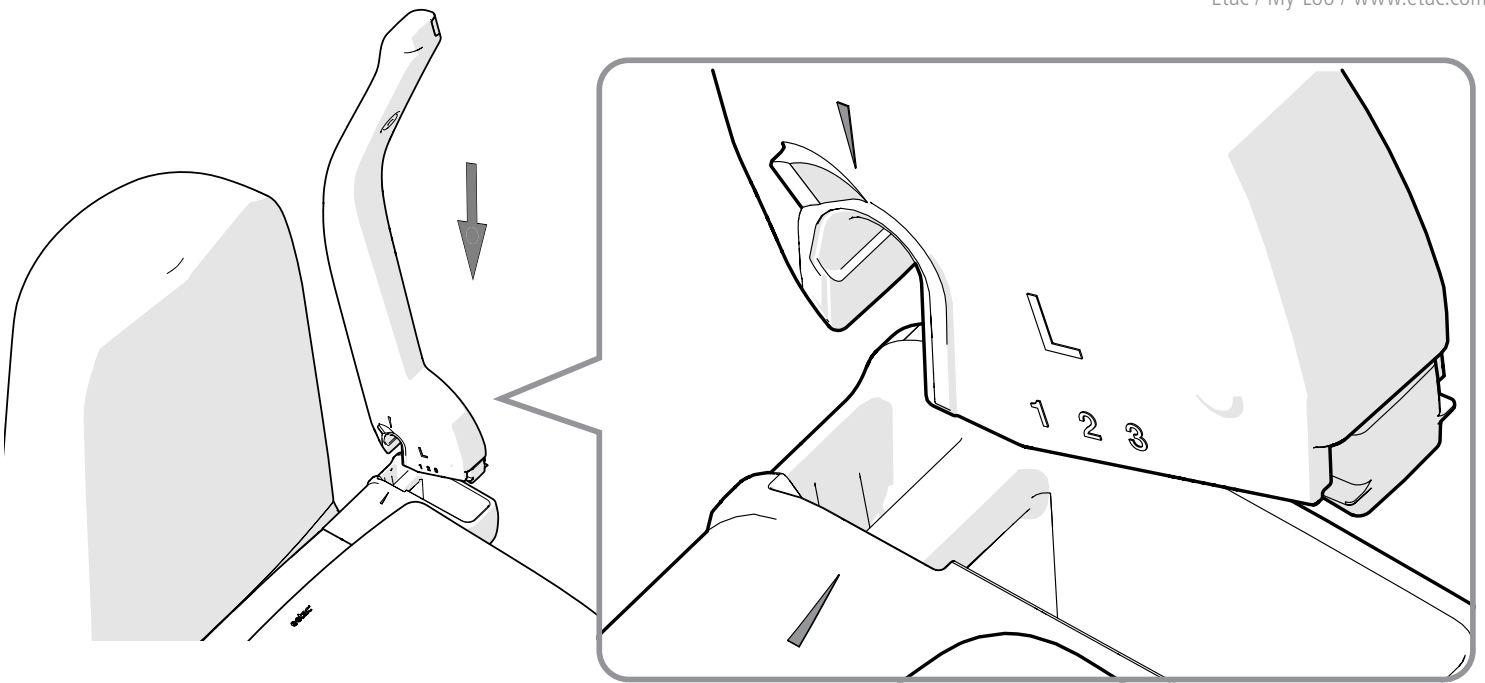

C

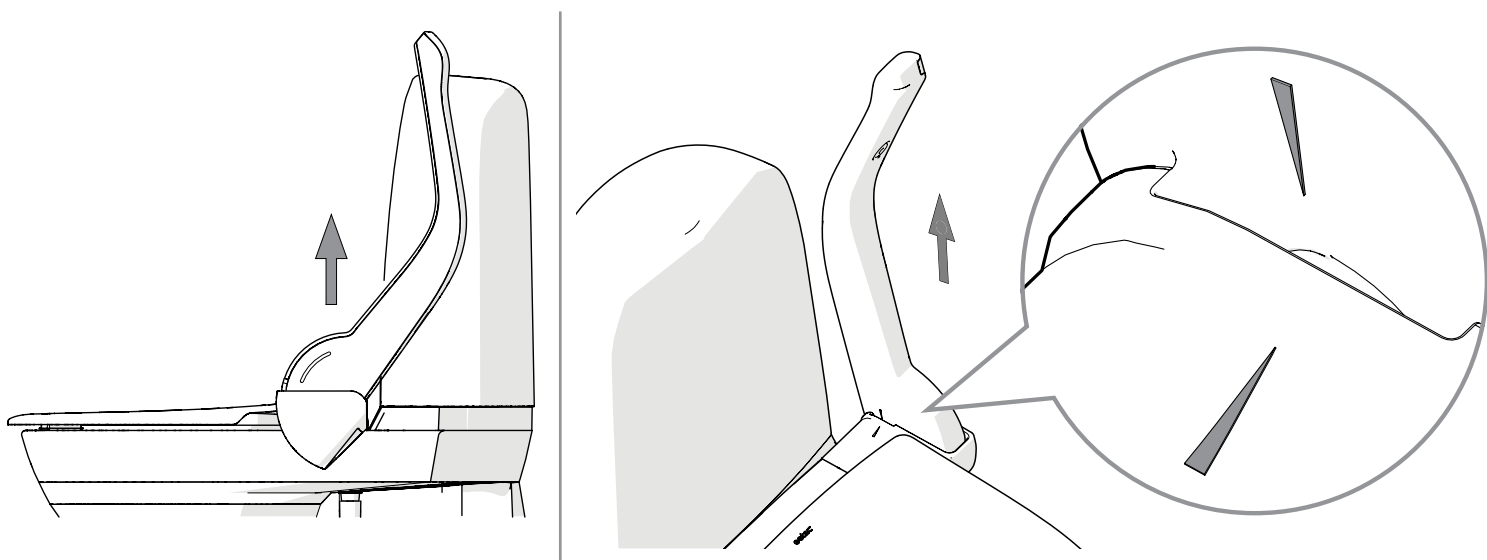

D

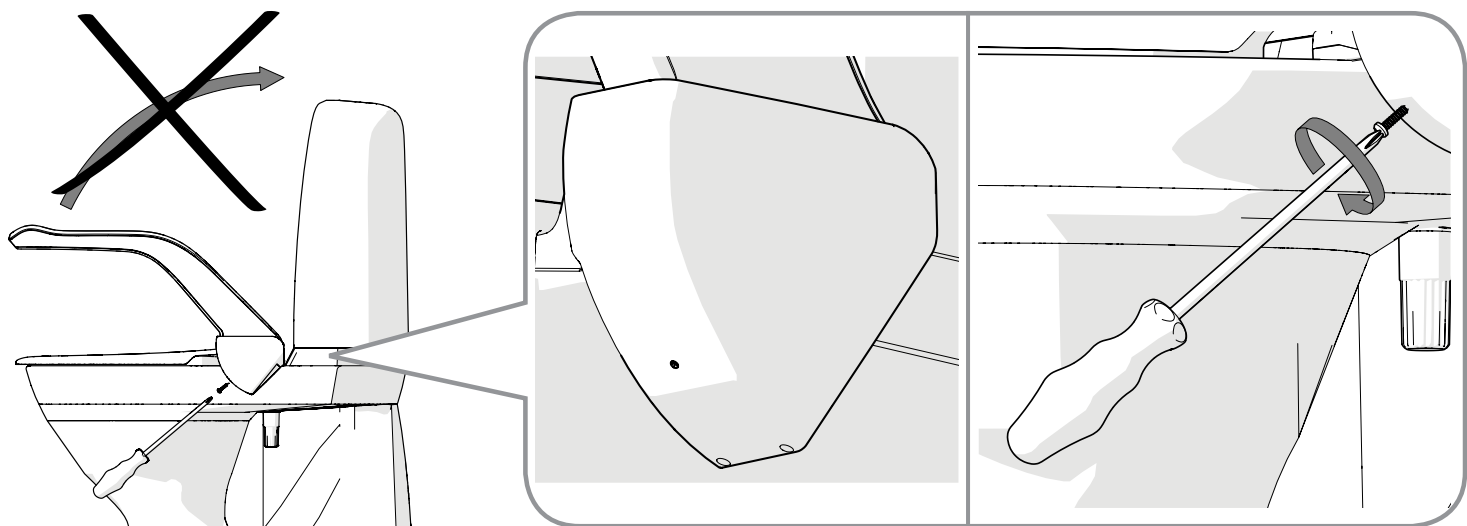

E

F

1




2



1



2

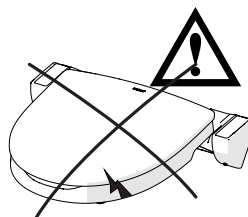


3




G


1

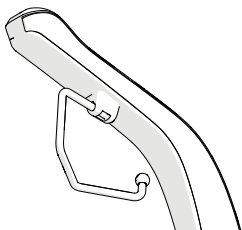

2

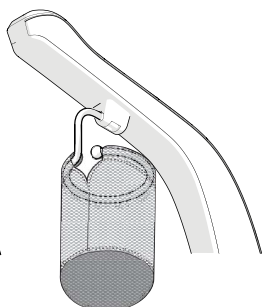


3

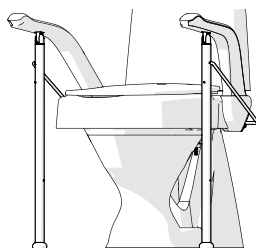


4





5

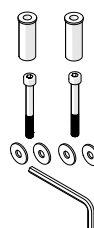

6

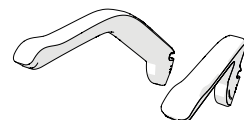

H

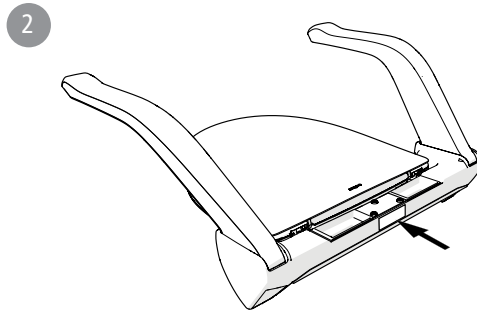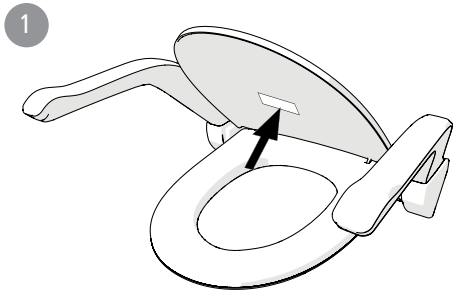


I

8030 1510	360 mm/ 400 mm	215 mm/ 285 mm	210 mm/ 275 mm	20 mm	480 mm	570 mm	215/245/285 mm
8030 1511	360 mm/ 400 mm	230 mm/ 360 mm	210 mm/ 275 mm	60 mm	480 mm	570 mm	175/205/245 mm
8030 1512	360 mm/ 400 mm	230 mm/ 360 mm	210 mm/ 275 mm	100 mm	480 mm	570 mm	135/165/205 mm
8030 1513	360 mm/ 400 mm	230 mm/ 360 mm	210 mm/ 275 mm	60 mm	-	-	-
8030 1514	360 mm/ 400 mm	230 mm/ 360 mm	210 mm/ 275 mm	100 mm	-	-	-

8030 1510	400 mm	c/c 123-203 mm	3.2 kg	150 kg (200 kg*)
8030 1511	400 mm	c/c 123-203 mm	3.4 kg	150 kg (200 kg*)
8030 1512	400 mm	c/c 123-203 mm	3.7 kg	150 kg (200 kg*)
8030 1513	400 mm	c/c 123-203 mm	2.2 kg	150 kg
8030 1514	400 mm	c/c 123-203 mm	2.4 kg	150 kg

* S příslušenstvím podpěrných nohou

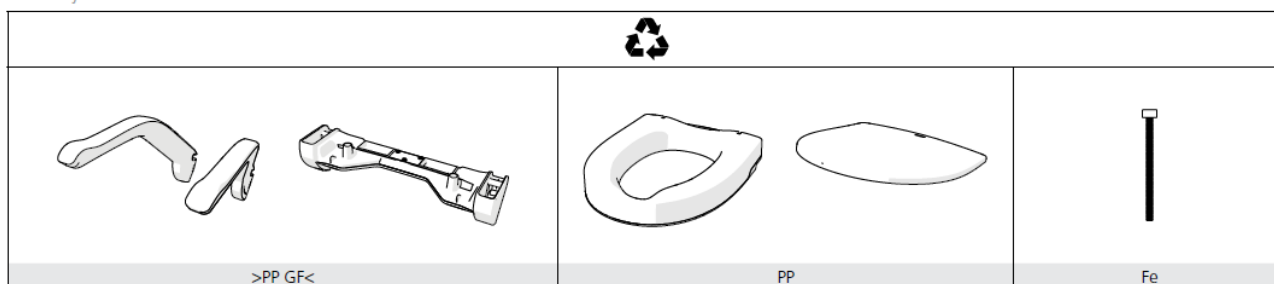

Čeština

Děkujeme vám za rozhodnutí pro zakoupení výrobku společnosti Etac.

Abyste předešli zranění během instalace, manipulace a používání, je třeba si pečlivě přečíst tento návod a uschovat jej pro budoucí použití. Najdete jej také na www.etac.com, kde také naleznete další dokumentaci.

Zamýšlené použití

Etac My-Loo fixed 6/10 cm (nástavec na WC) a My-Loo fixed 2 cm (madla na toaletu) jsou výrobky, které podporují uživatele s omezenou schopností sednout si a/nebo vstát z toalety. Etac My-Loo fixed lze používat s madly nebo bez nich. Madla poskytují extra stabilitu při sezení nebo vstávání z toalety. Výrobek je určen pro uživatele s omezenou schopností sednout si a/nebo vstát z toalety z důvodu např. snížené pohyblivost nebo síly. Výrobek lze použít na toalety standardního typu. Přesné údaje lze vyčíst z tabulky „technické údaje“ v části I.

Výrobek je určen pro použití v domácím prostředí a v institucích a nesmí být používán jiným způsobem, než je uvedeno výše.

Kontraindikace

Nejsou známy žádné kontraindikace.

Výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.



Nestůjte na výrobku.

Madla lze zatížit pouze ve sklopené vodorovné poloze.

Obsah dodávky **Obrázek A**

Montáž **Obrázek B**

Demontáž madla **Obrázek C**

Montáž pevných madel **Obrázek D**

Údržba a bezpečnost **Obrázek E**

Čištění a dezinfekce

1. Výrobek čistěte běžnými neabrazivními čisticími prostředky (hodnota pH mezi 5-9). Opláchněte a osušte.

Výrobek dezinfikujte dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu, 70%. Výrobek je jinak bezúdržbový.

2. Výrobek a jeho příslušenství lze bezpečně čistit ve sterilizátoru při 85°C po dobu 3 minut (pokud není uvedeno jinak). To platí pro opětovné použití.

Použité materiály jsou odolné proti korozi. Použité materiály jsou odolné vůči všem běžným dezinfekčním prostředkům.

Bezpečnost **Obrázek F**

1. Maximální hmotnost uživatele – viz technické údaje.



2. Vadný nebo nesprávně nainstalovaný výrobek se nesmí používat.



3. Toaletní nástavec musí být bezpečně ukotven.

V případě, že dojde k nežádoucí události v souvislosti s používáním výrobku, měla by být včas oznámena místnímu prodejci a příslušnému národnímu úřadu. Místní prodejce předá informace výrobci.

Záruka, životnost

Záruka na materiál a výrobní vady 5 let. Podmínky najdete na www.etac.com.

Životnost 5 let. Kompletní informace o životnosti výrobku najdete na www.etac.com.

Příslušenství.....Obrázek G

1. Držák toaletního papíru 2. Úložný box 3. Podpěrné nohy 4. Měkký polstr 5. Sada šroubů a expandérů (včetně podpěrných nohou – viz bod 3.). Pouze v kombinaci s madly a podpěrnými nohami 6. Madla

Umístění štítkuObrázek H

1. Štítek (varování, označení CE).

2. Štítek s číslem výrobku (sériové číslo, datum výroby).

Technické údajeObrázek I

Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 0371-58 73 00
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

Etac R82 GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Germany

Tel 02366-5006-0
Fax 02366-5006-200
info@etac.de
www.etac.de

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sweden

Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Etac R82 B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen,
Nederland

Tel +31 72 547 04 39
info.holland@etac.com
www.etac.com

Etac AS
Pb 249,
1501 Moss,
Norway

Tel 815 69 469
Fax 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Etac UK Limited
29 Murrell Green Business Park
London Road, Hook, Hampshire
RG27 9GR, United Kingdom

Tel 01256 767 181
Fax 01256 768 887
info@etacuk.com
www.etac.com

Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens
Denmark

Tel 79 68 58 33
Fax 75 68 58 40
info@etac.dk
www.etac.dk

R82 UK Limited.
Unit D4A, Coombswood Business
Park East
Coombswood Way, Halesowen
West Midlands B62 8BH
United Kingdom

Tel 0121 561 2222
Fax 0121 559 5437
enquiries@etac.uk.r82.com
www.etac.com

R82, Inc.
12801 E. Independence Boulevard
P.O. Box 1739
Matthews, NC 28106, USA

Tel 800 336 7684
Fax 704 882 0751
Information@snugseat.com
www.etac.com



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



etac[®]