


COMFORTISSE® POSTURE PRO

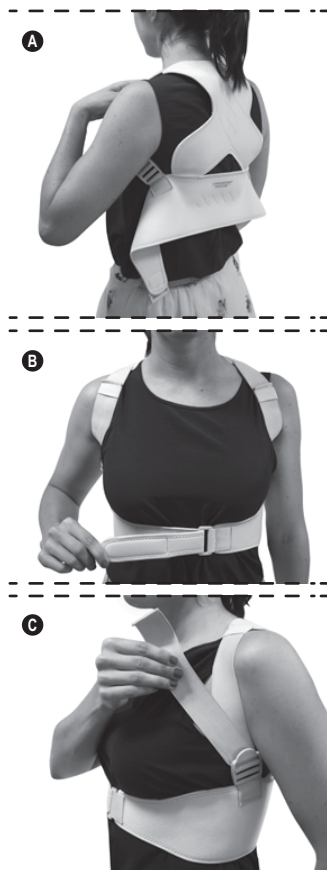

Comfortisse® Posture Pro vám pomůže dosáhnout vzpřímeného držení těla bez námahy

Varování:

Před prvním použitím Comfortisse® Posture Pro umyjte, abyste snížili případné zápachy. Pokud je produkt dobře větraný, pachy časem zmizí.

Ujistěte se, že můžete při nošení Comfortisse® Posture Pro zhluboka dýchat.

Nepoužívejte Comfortisse® Posture Pro během spánku.

Přestaňte oděv nosit, pokud vaše kůže praská nebo svědí.

Popis výrobku:

1. Pás
2. Elastické popruhy

Instrukce k použití:

1. Rozepněte pás.
2. Uvolněte elastické pásky.
3. Vložte ruce jako na obrázku (obr. A).
4. Nastavte pás tak, aby byl co nejtěsnější a nepohodlnější (obr. B).
5. Nalepte konec pásu do správné polohy.
6. Nastavte elastické popruhy, dokud nedosáhnete pohodlného vzpřímeného držení těla (obr. C).
7. Protáhněte konce elastických pásků upevňovacími prvky. Pokud chcete, můžete přebytečný popruh odstříhnout.

Instrukce k čištění:

- Perte ručně ve studené vodě.
- Nepoužívejte bělidlo.
- Nesuší v sušičce; nechte uschnout na vzduchu.
- Nevystavujte slunci.
- Nežehlit.
- Neždímejte.
- Nečistěte chemicky.

Složení:

Hlavní tkanina:

Vnitřní vrstva: 92 % polyester, 8 % konopné vlákno

Střední vrstva: 100% SBR (styren-butadienový kaučuk)

Vnější vrstva: 100% polyester

Elastický pás: 82 % polyester, 18 % elastodien

Podšívka: 90% polyester, 10% elastan

Popruh: 100% polyester

Zapínání: 60% polyester, 40% nylon

Záruka kvality

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v rámci lhůt stanovených legislativou platnou v každé zemi.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným používáním, nedbalým komerčním použitím, abnormálním opotřebením, nehodami nebo nesprávnou manipulací.

ISI GmbH
Edwardsstraße Lönkshausen 55
D 28131 Oldenburg Germany
www.isi-de.com
+49 (0) 441 95 07 08-0
isi@isi-de.com



Made in China