

NÁVOD K POUŽITÍ KOUPELNOVÉ MADLO ROVNÉ ALEX 910 ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK


POZOR!

Před použitím madla si prosím pečlivě přečtěte níže uvedený návod.

Model	RF-910/30	RF-910/40	RF-910/45	RF-910/60
Délka madla	30 cm	40 cm	45 cm	60 cm
Průměr trubky	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm	3,2 cm
Vzdálenost od stěny k vnitřní straně madla	3,8 cm	3,8 cm	3,8 cm	3,8 cm
Vzdálenost od stěny k vnější straně madla	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Maximální hmotnost uživatele	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Hmotnost	0.22 kg	0.29 kg	0.36 kg	0.43 kg



URČENÝ ÚČEL

Koupebné madlo pomáhá osobám se sníženou pohyblivostí udržovat rovnováhu a pohyb, zvyšuje bezpečnost osob při používání sanitárních zařízení a je vhodné pro instalaci do koupelen. Madlo je určeno pro použití v bytech, domovech důchodců a institucích obývaných osobami se zdravotním postižením. Výrobek se používá především k prevenci pádů.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Jakmile je madlo namontované, ujistěte se, že je bezpečně připevněné k podkladu a nehrozí nebezpečí pádu. Pokud je madlo upevněné příliš volně, hrozí nebezpečí pádu a zranění uživatele.
- Je zakázáno připevňovat madla ke slabým stěnám, např. sádrokartonu, protože stěna se může během používání zhroutit a uživatel může v důsledku toho utrpět vážná zranění.
- Věnujte zvláštní pozornost pevnému a bezpečnému uchopení rukojeti madla (zejména pokud je mokrá), než zcela opřete váhu těla o madlo. Příliš slabé uchopení madla může vést k pádu uživatele a zranění.
- Osoby alergické na plasty nesmí výrobek používat.
- Neinstalujte toto zařízení, aniž byste si nejprve přečetli a porozuměli tomuto návodu. Pokud těmto varováním a pokynům nerozumíte, obraťte se před instalací tohoto zařízení na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál, jinak může dojít ke zranění.
- Madla zvyšují bezpečnost v koupelnách a na toaletách, pokud jsou připevněny v souladu s pokyny. Umístění, velikost a úhel madla by měl určit kvalifikovaný odborník, aby byla zajištěna optimální bezpečnost a funkčnost.
- Buďte opatrní na mokrému povrchu vany nebo podlahy.
- Uživatelé s omezenými fyzickými schopnostmi by měli být v koupelnách a na toaletách pod dohledem nebo jim měla být poskytnuta pomoc, a to i při použití madla.
- Madlo může poskytnout oporu a zvýšenou stabilitu až do 100 kg. Madla nejsou navrženy tak, aby unesly celkovou hmotnost osoby. Madlo používejte pouze k poskytnutí opory.
- Madlo musí být používáno pouze pro úkony, pro které je určeno. Nepoužívejte jej k přivázání předmětů, zavěšení předmětů na něj ani k připojování předmětů k němu. To by mohlo mít vážný nepříznivý vliv na jeho funkčnost a bezpečnost.
- Jakákoli závažná událost související s prostředkem musí být nahlášena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

POZOR!


Nedodržení výše uvedených bezpečnostních pravidel může vést k vážným nehodám.

POZOR!

Poradte se se svým lékařem nebo fyzioterapeutem o vhodném použití madla v závislosti na vašich funkčních schopnostech a činnostech každodenního života.

MONTÁŽ

1. Připravte si montážní sadu (obr. 1).
2. Vyrvejte otvory pro upevňovací prvky o průměru odpovídajícím průměru upevňovacího prvku, jehož umístění ve zdi bude odpovídat umístění otvorů v základně madla. Hloubka otvoru v základně by se měla rovnat hloubce upevňovacího prvku plus 10 mm (obr. 2).
3. Vyčistěte otvor od prachu.
4. Vložte tělo spojovacího prvku do vyvrtaných otvorů (obr. 3).
5. Vložte upevňovací prvek do základny madla. Umístěte plastové krytky mezi základnu a rukojeť (obr. 3).
6. Zašroubujte ocelové šrouby do upevňovacího prvku po celé jejich délce. U šroubů dodávaných s rukojetí použijte podklad z pevné keramické a silikonové cihly nebo běžného betonu. Je třeba dbát na to, aby otvor nepropadl maltou. Nedoporučuje se instalovat madlo na sádkartonový podklad.
7. Umístěte plastové krytky na hlavy ocelových šroubů (obr. 4).

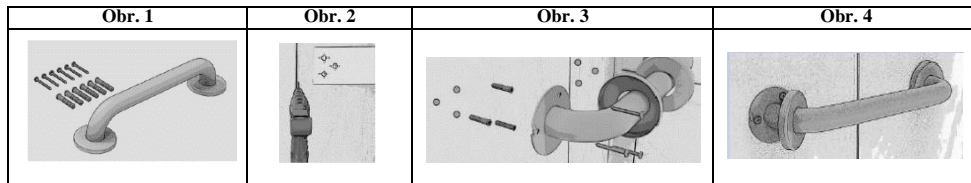

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

1. Uchopte madlo pevně rukou. Dbejte na to, aby vám ruka neklouzala po rukojeti madla, zejména pokud je mokrá.
2. Vytáhněte se za madlo a proveďte zamýšlenou akci, například vstávání.
3. Před uvolněním madla se ujistěte, že bude možné bezpečně udržet přijatou polohu bez podpory madla.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Při používání madla by měly být upevňovací šrouby pravidelně kontrolovány, zda nejsou uvolněné. Pokud je zjištěna jakákoli vůle, měla by být zkontrolována příčina a šrouby by měly být utaženy nebo vyměněny za nové spolu s upevňovacími prvky.
- Pokud rukojeť madla samovolně spadne ze svislé polohy, je nutné utáhnout upevňovací šrouby.
- Madlo by mělo být pravidelně kontrolováno a udržováno a jakékoli viditelné poškození nebo známky nesprávného použití by měly být odstraněny.
- Udržujte madlo čisté. Tento výrobek by měl být pravidelně čištěn běžnými čisticími prostředky pro domácnost v koupelně. Po čištění madlo vždy opláchněte vodou a poté jej důkladně otřete měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky čisticího materiálu. Nepoužívejte silné nebo koncentrované kyselé, zásadité nebo jiné čisticí prostředky, protože by mohly změnit barvu nebo poškodit výrobek.
- Pokud je vyžadována dezinfekce, použijte standardní postupy dezinfekce.
- Toto madlo je dodáváno v obalu, aby se zabránilo kontaminaci produktu až do instalace. Obal je recyklovatelný a musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.
- Po každém seřízení, opravě nebo servisu se před dalším použitím ujistěte, že jsou všechny upevňovací prvky bezpečně utaženy.
- Ujistěte se, že je madlo správně a bezpečně namontováno. Nikdy nepoužívejte madlo, pokud si všimnete jakékoli vůle.



POZOR!

K čištění madla nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky.



POZOR!

Pravidelně kontrolujte upevnění madla, abyste se ujistili, že je bezpečné.

SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

Madlo je vyrobena z ABS (akrylonitril-butadien-styrenový terpolymer) – 100%.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Výrobce
	Označení CE
	Referenční číslo
	Datum výroby
	Viz návod k obsluze
	Varování
	Sériové číslo
	Tímto směrem nahoru, nepřevracujte
	Skladujte v suchu
	Křehké, zacházejte opatrně



REHA FUND Sp. z o.o.

Ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
E-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Verze 1.2
Vydáno: 08/2021



ZÁRUČNÍ LIST KOUPELNOVÉ MADLO ROVNÉ ALEX 910

Model:	Sériové číslo:	Datum prodeje	Podpis a razítko prodávajícího:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Výrobce ujišťuje zákazníka, že položka, na kterou je vydán tento záruční list, je zcela nová a vysoce kvalitní.
2. Na madlo se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje uvedeného v záručním listu.
3. Jakékoli závady na zařízení budou výrobcem bezplatně odstraněny za předpokladu, že zařízení bylo používáno v souladu s určeným účelem a v souladu s doporučením v návodu k použití.
4. Jakékoli závady na zařízení budou opraveny společností REHA FUND Sp. z o.o. nebo autorizovanými servisními technikými za předpokladu, že stolička byla používána v souladu s jejím účelem a doporučeními v návodu k použití.
5. Oprava bude provedena v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 14 dnů, ode dne převzetí zařízení v servisním středisku.
6. Záruka se nevztahuje na:
 - údržbu, čištění a seřízení popsané v návodu k použití;
 - díly, které se opotřebovávají běžným používáním;
 - mechanické a tepelné poškození, např. ohnutí, poškrábání, zlomení atd.;
 - poškození způsobené používáním zařízení v rozporu s návodem k použití, nedbalostí, prováděním samostatných oprav, úprav nebo konstrukčních změn.
7. Před předáním zařízení autorizovanému servisnímu technikovi k opravě je nutné zařízení vyčistit v souladu s návodem k použití.
8. Opravy a výměny náhradních dílů by měli provádět autorizovaní servisní technici společnosti Reha Fund Sp. z o.o.
9. V případě neoprávněného servisního zásahu budou kupujícímu účtovány náklady na dopravu.
10. Územní rozsah záruční ochrany se vztahuje na území České republiky.
11. Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou.

KONTROLA/OPRAVA (provádí servis)

	Datum ohlášení	Objednávka č.	Popis závady/rozsah opravy	Datum opravy	Razítko a podpis servisního střediska
1.					
2.					