

**NÁVOD K POUŽITÍ
REHABILITAČNÍ MÍČEK S HROTY
PILO-3006/-3007/-3008/-3009/-3010
"ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK"**



POZOR! Před prvním použitím výrobku si přečtěte návod k použití.

Při nákupu si prosím zkontrolujte úplnost a kvalitu produktu. Případné námítky nahlaste osobě, která doklad vystavila. Při hlášení kvantitativních/kvalitativních reklamací se prosím řiďte ustanoveními záručního listu, tj. předložte doklad o koupi a záruční list vyplněný prodávajícím.

I. POPIS PRODUKTU

Míček s hroty je určen pro rehabilitaci, cvičení paží a nohou a masáže těla. Hroty jsou po celém povrchu, což navíc stimuluje receptory na kůži, zlepšuje krevní oběh a mikrocirkulaci. Snižují napětí, relaxují svaly a uvolňují. Jeho speciálně tvarovaný tvar zajišťuje lepší přizpůsobení tělu.

II. VLASTNOSTI

Je vyroben z vysoce kvalitního PVC materiálu, bez zápachu a je netoxický.

Dostupné velikosti: 6, 7, 8, 9, 10 cm

III. POUŽITÍ

1. Zujte si boty a v sedu nebo ve stoje lehce šlápněte nohou na míček. Kutálejte míč tam a zpět.
2. Pomocí míčku si můžete sami masírovat svaly paží a krku.



3. Otočte se zády ke zdi a umístěte míček mezi krk a lopatku. Jemně se opřete o zeď a posouvejte se nahoru a dolů nebo ze strany na stranu. Zadržte míček na místě, zatlačte a opakujte.



IV. SLOŽENÍ

Polyvinylchlorid (PVC) 100%

V. PODMÍNKY POUŽITÍ

- Výrobek a jeho součásti se smí používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
- Udržujte výrobek v čistotě podle doporučení uvedených v tomto návodu. Nesprávné čištění a údržba výrobku může vést k jeho zničení.
- Výrobek není hračka. Vždy, když výrobek používají děti, je vyžadován dohled dospělé osoby.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Jakýkoli závažný incident týkající se prostředku musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.





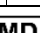
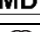




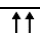
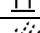

VI. KONTRAINDIKACE

- Nepoužívat u pacientů se smyslovými poruchami nebo u osob s kožními lézemi, jako jsou vředy, puchýře, odřeniny atd.
- Před použitím se doporučuje konzultace s rehabilitačním asistentem nebo fyzioterapeutem.
- Výskyt bolesti během cvičení
- Záněty kloubů a periartikulárních tkání
- Otok
- Čerstvé pooperační jizvy nebo jiné rány

VII. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vyhňte se vysokým teplotám
- Omyjte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem
- Nepoužívejte abrazivní prostředky
- Nečistěte agresivními chemikáliemi
- Sušte ve stínu a na vzdušném místě – nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Výrobek není tepelně odolný a při vysokých teplotách ztrácí své vlastnosti.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Výrobce
	Označení CE
	Referenční číslo
	Datum výroby
	Zdravotnický prostředek
	Přečtěte si návod k použití
	Varování
	Číslo šarže
	V tomto směru ve správné poloze, nepřevracet
	Uchovávejte v suchu
	Křehké, zacházejte opatrně
	Neprořezávejte
	Obal je recyklovatelný



REHA FUND Sp. z o.o.

Ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko
tel.: +48 669 222 213; +48 605 499 599
E-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
Vydáný: