

### NÁVOD K POUŽITÍ OPĚRKA ZAD DO POSTELE 950

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Katalogové číslo:       | RF-950                 |
| Max. bezpečné zatížení: | 75 kg                  |
| Nastavení úhlu sklonu:  | 40°-80°                |
| Rozměry:                | délka 47 - šířka 63 cm |
| Váha:                   | 2,64 kg                |



#### UPOZORNĚNÍ!

Před použitím opěrky zad do postele si prosím pečlivě přečtete následující pokyny.

#### URČENÝ ÚČEL

Opěrka zad do postele je určena pro osoby, které vyžadují vyšší polohu trupu při ležení.

#### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA


Dodržujte následující pravidla:

1. Před použitím opěrky do postele se ujistěte, že je správně zajištěná v pevné poloze.
2. Používejte pouze originální příslušenství. Použití neoriginálních dílů může způsobit poruchu zařízení.
3. Nepřekračujte maximální přípustné zatížení opěrky zad do postele.
4. Neskladujte opěrku při teplotě nižší než 0 °C.
5. Při nastavování úhlu sklonu opěrku nepoužívejte.
6. Během používání a nastavování dbejte, aby si někdo přiskřípl ruce.
7. Pravidelně kontrolujte šrouby, zda nejsou uvolněné.
8. Jakýkoli závažný incident související s prostředkem musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.



**UPOZORNĚNÍ!** Nedodržení výše uvedených pravidel pro bezpečné používání může vést k vážným nehodám.

#### ČÁSTI OPĚRKY ZAD DO POSTELE

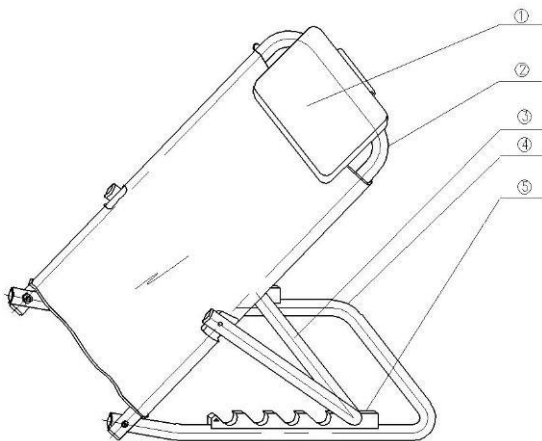

1. Opěradlo pro hlavu.
2. Trubka pro nastavení opěrky.
3. Držák pro nastavení opěrky.
4. Spodní trubka.
5. Nastavovací přezka.

## NASTAVENÍ ÚHLU NÁKLONU

1. Zvedněte seřizovací držák pro nastavení opěrky rukou nahoru.
2. Vyjměte trubku držáku ze zajišťovacího otvoru umístěného v nastavovací přezce.
3. Vložte trubku držáku do odpovídajícího otvoru podle zvoleného úhlu sklonu.
4. Zkontrolujte, zda je opěrka zad do postele bezpečně zajištěna v poloze.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Doporučuje se pravidelně kontrolovat opěrku zad do postele, zda není poškozená nebo nejeví viditelné známky opotřebení.
- Opěrka zad do postele se doporučuje pravidelně čistit měkkým hadříkem a mýdlovou vodou. Po vyčištění je osušte měkkým hadříkem a nechte látku uschnout na vzduchu.



### UPOZORNĚNÍ!

K čištění opěrky zad do postele nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní prostředky.



### UPOZORNĚNÍ!

Máte-li jakékoli pochybnosti o vhodnosti zařízení k použití, obraťte se na servis výrobce.

## SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Opěradlo pro hlavu                         | nylon |
| Trubka pro nastavení opěrky zad do postele | ocel  |
| Držák pro nastavení opěrky zad do postele  | ocel  |
| Spodní trubka                              | ocel  |
| Nastavovací přezka                         | plast |

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Výrobce                            |
|  | Označení CE                        |
|  | Referenční číslo                   |
|  | Datum výroby                       |
|  | Přečtete si návod k použití        |
|  | Upozornění                         |
|  | Sériové číslo                      |
|  | Tímto směrem nahoru, nepřevracujte |
|  | Skladujte v suchu                  |
|  | Křehké, zacházejte opatrně         |



**REHA FUND Sp. z o.o.**

Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko  
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
E-mail: [info@rehafund.pl](mailto:info@rehafund.pl) [www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)



Ver. 1.3  
Vydáno: 02/2021

**ZÁRUČNÍ LIST**  
**OPĚRKA ZAD DO POSTELE 950**

|        |                |                |                                 |
|--------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Model: | Sériové číslo: | Datum prodeje: | Podpis a razítko prodávajícího: |
|        |                |                |                                 |

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. Výrobce ujišťuje zákazníka, že předmět prodeje, na který je vydán tento záruční list, je zcela nový a vysoce kvalitní.
2. Na opěrku zad do postele se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje uvedeného v záručním listu.
3. Základem pro posouzení reklamace je dodání správně vyplněného záručního listu s přiloženým dokladem o koupi.
4. Jakékoli závady na zařízení budou odstraněny společností REHA FUND Sp. z o.o. nebo autorizovanými servisními technikami za předpokladu, že opěrka zad do postele byla používána v souladu s určeným účelem a doporučeními v uživatelské příručce.
5. Oprava bude provedena co nejdříve, nejdéle však do 14 dnů, ode dne převzetí zařízení v servisním místě.
6. Záruka se nevztahuje na:
  - činnosti údržby, čištění a seřizování popsané v návodu k použití;
  - díly, které podléhají opotřebení při běžném používání, např. pryžové díly, pružiny, plastové obložení, čalounění atd.
  - mechanické a tepelné poškození, např. ohýbání, škrábance, lámání atd.;
  - škody způsobené používáním zařízení v rozporu s návodem k obsluze, nedbalostí, prováděním samostatných oprav, úprav nebo konstrukčních změn
7. Před předáním zařízení autorizovaným servisním technikům jej vyčistěte v souladu s návodem k použití tak, aby bylo vhodné pro servis.
8. Opravy a výměny náhradních dílů by měly být prováděny autorizovanými servisními technikami Reha Fund Sp. z o.o.
9. V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány náklady na dopravu.
10. Územní rozsah záruční ochrany zahrnuje území České republiky.
11. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou.

**SEZNAM SERVISNÍCH OPRAV** (vyplní službu)

| Č. | Datum ohlášení | Číslo objednávky | Popis závady / Rozsah opravy | Datum vykonání opravy | Podpis a razítko servisu |
|----|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. |                |                  |                              |                       |                          |
| 2. |                |                  |                              |                       |                          |

## POZNÁMKY