

NÁVOD K POUŽITÍ**REHABILITAČNÍ MÍČ ABS
PILO-1045/-1055/-1065/-1075
"ZDRAVOTNICKÝ
PROSTŘEDEK"**

UPOZORNĚNÍ! Před prvním použitím výrobku si přečtěte tento návod.

Při nákupu si ověřte úplnost a kvalitu produktu. Jakékoli námítky nahlaste osobě, která je vydala. Při hlášení kvantitativních/kvalitativních reklamací byste měli dodržovat ustanovení záručního listu, tj. předložit doklad o koupě a záruční list vyplněný obchodem.

I. POPIS PRODUKTU

Míč je určen pro rehabilitační a všeobecná vývojová cvičení s ABS. Ideální pro cviky, které napravují chyby držení těla, zlepšují kondici, posilují svaly a zvyšují pohyblivost kloubů. Slouží k balančním a protahovacím cvikům, ke zmírnění bolestí zad a nadměrného svalového napětí.

II. VLASTNOSTI

Je vyroben z nejkvalitnějšího PVC materiálu, který zabraňuje náhlému prasknutí míče při poškození a zajišťuje pomalou a rovnoměrnou ztrátu vzduchu. Určeno pro vnitřní použití a na rovných, tvrdých površích.

Dostupné ve velikostech:

- 45 cm při výšce 140–154 cm,
- 55 cm při výšce 155–169 cm
- 65 cm pro výšku 170–184 cm
- 75 cm při výšce 185 cm a více

III. POUŽITÍ

1. Vyjměte míč z obalu a před nafouknutím jej nechte 1-2 hodiny odležet při pokojové teplotě.
2. Odstraňte zátku a vložte špičku pumpy do otvoru.
3. Míč pumpujte postupně tak, aby se materiál pomalu natahoval.
4. Po nafouknutí rychle vyjměte špičku pumpy a vyměňte zátku.
5. Materiál míče může být nutné natáhnout, aby bylo dosaženo maximálního očekávaného průměru. Doporučuje se naplnit míč vzduchem asi na 80-85 % jeho velikosti a po několika hodinách na celkovou velikost.

IV. SLOŽENÍ

Polyvinylchlorid (PVC) 100%

V. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

- Výrobek a jeho součásti by měly být používány pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
- Udržujte výrobek v čistotě podle doporučení uvedených v tomto návodu. Nesprávné čištění a údržba výrobku může vést ke zničení.
- Výrobek není hračka. Pokud výrobek používají děti, je vždy vyžadován dohled dospělé osoby.
- Nenařezávejte nad maximální povolenou velikost vyznačenou na obalu.
- Udržujte míč mimo dosah ostrých předmětů.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Jakákoli vážná nehoda související s prostředkem musí být nahlášena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.





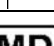
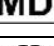





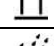

VI. KONTRAINDIKACE

- Nepoužívat u pacientů se smyslovými poruchami a u lidí s kožními lézemi, jako jsou vředy, puchýře, odřeniny atd.
- Před použitím se doporučuje poradit se s fyzioterapeutem nebo rehabilitačním pracovníkem
- Stavby bezprostředně po dislokacích nebo zlomeninách kostí
- Neúplné zhojení kostí
- Záněty kloubů a periartikulárních tkání
- Čerstvé pooperační jizvy nebo jiné rány

VII. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vyhněte se vysoké teplotě
- Omyjte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem
- Nepoužívejte abrazivní prostředky
- Nečistěte chemicky
- Sušte naplocho na stinném a dobře větraném místě – nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Výrobek není tepelně odolný a při vysokých teplotách ztrácí své vlastnosti.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Výrobce
	Označení CE
	Referenční číslo
	Datum výroby
	Zdravotnický prostředek
	Přečtěte si návod k použití
	Upozornění
	Číslo série
	V tomto směru ve správné poloze, nepřevracujte
	Uchovávejte v suchu
	Křehké, zacházejte opatrně
	Neřežte
	Recyklovatelné obaly



REHA FUND Sp. z o.o.
Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko
tel.: +48 669 222 213; +48 605 499 599
E-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
Vydáno:20.4.2022

ZÁRUČNÍ LIST
REHABILITAČNÍ MÍČ ABS
PILO-1045/-1055/-1065/-1075

Model:	Sériové číslo:	Datum prodeje:	Podpis a razítko prodávajícího:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Výrobce ujišťuje zákazníka, že předmět prodeje, pro který je tento záruční list vydán, je zcela nový a vysoce kvalitní.
2. Na výrobek se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje uvedeného v záručním listu.
3. Podkladem pro posouzení reklamace je dodání správně vyplněného záručního listu s příloženým dokladem o koupi.
4. Jakékoli závady na zařízení budou odstraněny společností REHA FUND Sp. z o.o. nebo autorizovaným servisním technikem za předpokladu, že zařízení bylo používáno v souladu s jeho účelem a doporučeními uvedenými v návodu k použití.
5. Oprava/výměna bude provedena co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od data převzetí zařízení v servisním místě.
6. Záruka se nevztahuje na:
 - činnosti související s údržbou, čištěním a seřizováním popsané v návodu k použití;
 - díly podléhající opotřebení při běžném používání;
 - mechanické a tepelné poškození popruhu, např. přetržení, roztržení atd.;
 - poškození způsobené používáním zařízení v rozporu s návodem k použití, nedbalostí, prováděním vlastních oprav, úprav nebo konstrukčních změn.
7. Před vrácením spotřebiče autorizovanému servisnímu technikovi je nutné jej vyčistit podle návodu k použití, aby byl vhodný pro servis.
8. Opravy a výměny by měly být prováděny autorizovanými servisními techniky Reha Fund Sp. z o.o.
9. V případě neoprávněné reklamace budou zákazníkovi účtovány náklady na dopravu.
10. Územní rozsah záruční ochrany zahrnuje území České republiky.
11. Záruka na prodané zboží nevyklučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou.