

Chodítka RF-131

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Pro vaši bezpečnost dodržujte následující doporučení:

1. Před použitím chodítka vždy zkontrolujte, zda:
 - chodítka je nastaveno do správné výšky;
 - zamykací mechanismus tlačítek pro nastavení výšky jsou správně zajištěny;
 - všechny nožičky chodítka jsou nastaveny na stejnou výšku;
 - protiskluzové krytky na nožičkách nejsou opotřebované – pokud ano, vyměňte je.
 - Nepřekračujte maximální povolené zatížení chodítka.
2. Při používání chodícího rámu buďte vždy extrémně opatrní. Vyhněte se všem potenciálním nebezpečím, jako jsou nerovné nebo měkké povrchy, překážky v cestě, mokré podlahy atd.
3. Používejte pouze originální příslušenství. Použití neoriginálních dílů může vést k nesprávnému nastavení chodítka, což může mít za následek riziko pádu.
4. Neskladujte chodítka při teplotách pod 0°C.
5. Jakýkoli vážný incident související s prostředkem musí být oznámen výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

POZOR!

Nedodržení výše uvedených pravidel bezpečného používání může vést k vážným nehodám.

Poradte se se svým lékařem nebo rehabilitačním asistentem o výběru vhodného chodítka a příslušenství a způsobu použití v souladu s vašimi funkčními možnostmi a každodenními aktivitami.

Následující doporučení je doporučením výrobce, ale je třeba jej konzultovat se svým lékařem nebo rehabilitačním asistentem.

Pokud je chodítka správně nastaveno, uživatel by měl být schopen udržet vzpřímený postoj s mírně pokrčenými loketními klouby. Při chůzi pak rám chodítka přebírá váhu těla.