

NÁVOD K POUŽITÍ ORTOPEDICKÝ POLŠTÁŘ MORPHEUS DELICATE

Kód: 664

Rozměry: 48 cm x 30 cm x 1 1/4 cm

 **Před použitím polštáře si prosím pozorně přečtete níže uvedený návod.**



URČENÝ ÚČEL

Polštář je určen k použití při prevenci a předcházení degenerace a bolesti krční páteře způsobené nesprávnou polohou během spánku, pro osoby, které mají problémy z důvodu nesprávné polohy krku a hlavy během spánku (např. bolesti zad, svalové napětí, brnění a necitlivost končetin apod.), které potřebují stabilní oporu krku a hlavy během spánku. Pro všechny typy postav a výšek, pro lidi spící na zádech nebo na boku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem. Potah na polštář vyperte a vyčistěte podle informací na štítku. Po vyčištění dobře vysušte.

 **POZNÁMKA:** Nenamáčejte všechnu pěnu do vody.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte mokrý výrobek v přímém kontaktu s pokožkou.

Nepoužívejte v případě alergických kožních reakcí.

Nepoužívejte, pokud došlo k mechanickému poškození (např. natržení, prasknutí).

Nepoužívejte jinak, než je určené.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se poradte s lékařem nebo rehabilitačním specialistou o kontraindikacích použití produktu.

Výrobek by se měl přizpůsobit velikosti těla s použitím podložky pro nastavení výšky nebo bez ní.

Nevystavujte výrobek otevřenému ohni nebo jiným zdrojům vznícení. Pěna vystavená otevřenému ohni se rychle vznítí.

Nevystavujte výrobek po dlouhou dobu nízkým teplotám (pod 5 °C). Obal výrobku není hračka.

Jakýkoli závažný incident týkající se přípravku musí být nahlášen výrobcí a Úřadu pro registraci léčivých přípravků pro zdravotnické prostředky a biocidní přípravky.

 **POZOR!** Pěna by měla být chráněna před slunečním zářením, protože při vystavení slunečnímu záření může změnit barvu. Změna barvy pěny nemá vliv na její fyzikální a mechanické vlastnosti.

SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

Pěnová vložka	100% polyuretanová pěna
Podšívka	100% polyester
Potah	100% bavlna

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Výrobce
	Označení CE
	Referenční číslo
	Datum výroby
	Viz návod k obsluze
	Varování
	Číslo šarže
	Nahore, nepřevracet
	Skladujte v suchu
	Křehké, zacházejte opatrně
	Neperte
	Nebělte
	Nežehlete
	Nečistěte chemicky
	Sušte rozložený naplocho ve stínu



REHA FUND Sp. z o.o.

Ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
E-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Verze 1.3

Vydáno: 01/2021



ZÁRUČNÍ LIST
ORTOPEDICKÝ POLŠTÁŘ MORPHEUS DELICATE

Model:	Sériové číslo:	Datum prodeje:	Podpis a razítko prodávajícího:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Výrobce garantuje zákazníkovi, že předmět, na který je vydán tento záruční list, je zcela nový a vysoce kvalitní.
2. Na polštář se vztahuje záruční doba 36 měsíců od data prodeje uvedeného v záručním listu.
3. Podkladem pro posouzení reklamace je dodání správně vyplněného záručního listu s přiloženým dokladem o koupi.
4. Jakékoli závady na zařízení budou odstraněny společností REHA FUND Sp. z o.o. nebo autorizovanými servisními technikami za předpokladu, že polštář byl používán v souladu s jeho určeným účelem a doporučeními uvedenými v návodu k použití.
5. Oprava bude provedena v co nejkratším možném termínu, maximálně do 14 dnů od data převzetí výrobku v servisním středisku.
6. Záruka se nevztahuje na:
 - údržbu, čištění a nastavení polštáře podle návodu k použití;
 - díly opotřebované při běžném používání;
 - mechanické a tepelné poškození, např. deformace, roztržení;
 - škody způsobené používáním zařízení, které není v souladu s návodem k použití, nedbalostí, prováděním nezávislých oprav, úpravami nebo konstrukčními změnami.
7. Před předáním výrobku do autorizovaného servisního střediska je nutné jej vyčistit v souladu s návodem k použití, aby byl vhodný pro servis.
8. Opravy a výměny náhradních dílů by měli provádět autorizovaní servisní technici společnosti Reha Fund Sp. z o.o.
9. V případě neopodstatněné reklamace bude zákazníkovi účtovány náklady na doručení.
10. Územní rozsah záruční ochrany se vztahuje na území České republiky.
11. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou.

SEZNAM SERVISNÍCH OPRAV (vyplňuje servis)

	Datum ohlášení	Č. Objednávky	Popis závady/rozsah opravy	Datum opravy	Razítko a podpis servisu
1.					
2.					

POZNÁMKY